

! Important Before You Begin

Wash your hands thoroughly with soap and water. Ensure all components remain sterile by keeping them sealed until use. Use in a clean, calm environment.

! شروع کرنے سے پہلے ضروری ہدایات
اپنے ہاتھ صابن اور پانی سے اچھی طرح دھوئیں۔ تمام چیزیں استعمال سے
پہلے پیک رہیں تاکہ جراثیم سے محفوظ رہیں۔ عمل کو صاف اور پرسکون
جگہ پر انجام دیں۔



Step 1: Prepare the Collection Cup

Take out one sterile collection cup from its packaging. Place it on a clean, flat surface.

پہلا مرحلہ: کلیکشن کپ تیار کریں
ایک سٹرائل کلیکشن کپ پیکنگ سے نکالیں اور اسے کسی صاف اور ہموار
سطح پر رکھیں۔



! Important Before You Begin

LittleWishKit

👤 Step 2: Collect the Semen Sample

Collect the semen sample directly into the sterile collection cup. Ensure the cup remains uncontaminated.

دوسرا مرحلہ: سیمین کا نمونہ جمع کریں
سیمین کا نمونہ براہ راست سٹرائل کلیکشن کپ میں جمع کریں۔ خیال رکھیں
کہ کپ آلودہ نہ ہو۔



💉 Step 3: Prepare the Syringe (Vaginal Applicator)

Open the sterile syringe package. Remove the protective cap from the tip of the syringe and discard it. The syringe is now ready for use.

تیسرا مرحلہ: سرنج (ویجائنل ایپلیکیٹر) تیار کریں
سٹرائل سرنج کو اس کی پیکنگ سے نکالیں۔ سرنج کے اگلے حصے سے
کیپ ہٹا دیں اور اسے ضائع کر دیں۔ اب سرنج استعمال کے لیے تیار ہے۔



! Important Before You Begin

💡 Step 4: Draw Semen into Syringe

Gently draw semen from the collection cup into the syringe by pulling the plunger upward. Ensure no air bubbles remain.

چوتھا مرحلہ: سیمین کو سرنج میں لیں
پسٹن کو آہستہ آہستہ اوپر کھینچ کر سیمین کو کلیکشن کپ سے سرنج میں
لیں۔ خیال رکھیں کہ اس میں ہوا کے بلبلے نہ ہوں۔



🌸 Step 5: Insert Syringe and Inseminate


Find a comfortable position (e.g., lying on your back with knees bent). Slowly and gently insert the syringe into the vagina. Press the plunger to release the semen.

پانچواں مرحلہ: سرنج داخل کریں اور سیمین خارج کریں
آرام دہ پوزیشن لیں (مثلاً کمر کے بل لیٹ کر گھٹنے موڑ لیں)۔ سرنج کو
آہستگی سے اندام نہانی میں داخل کریں اور پسٹن دبائیں تاکہ سیمین خارج ہو
جائے۔

!! بہت اہم: سرنج داخل کرنے سے پہلے کیپ ضرور ہٹا دیں !!

!! Very Important: Remove the cap from the syringe before penetrating!

⚠️ Ensure that cap is removed from applicator before inserting.

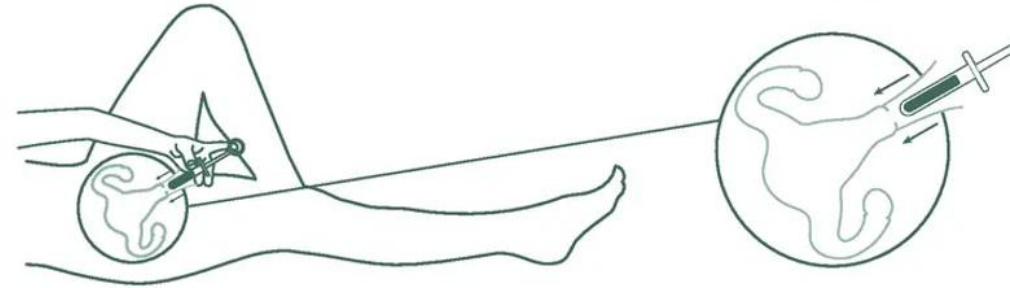

! Important Before You Begin

LittleWishKit

🕒 Step 6: Remain Reclined

Stay in a reclined position for 15–30 minutes to maximize effectiveness. Do not stand up immediately after insemination.

🕒 چھٹا مرحلہ: لیٹے رہیں
اثر کو بڑھانے کے لیے تقریباً 15 سے 30 منٹ تک لیٹے رہیں۔ انسیمینیشن کے فوراً بعد نہ اٹھیں۔



Good Luck!

🗑️ Step 7: Dispose of Items Properly

Throw away the used syringe and collection cup. Do not reuse any components. Wash your hands again thoroughly.

🗑️ ساتواں مرحلہ: چیزوں کو صحیح طریقے سے ضائع کریں
استعمال شدہ سرنج اور کلیکشن کپ کو پھینک دیں۔ کسی چیز کو دوبارہ استعمال نہ کریں۔ اپنے ہاتھ دوبارہ اچھی طرح دھوئیں۔

